


FebriDx® Istruzioni Rapide


Un test non utilizzato mostrerà tre linee di colore arancione molto chiaro nella finestra dei risultati.

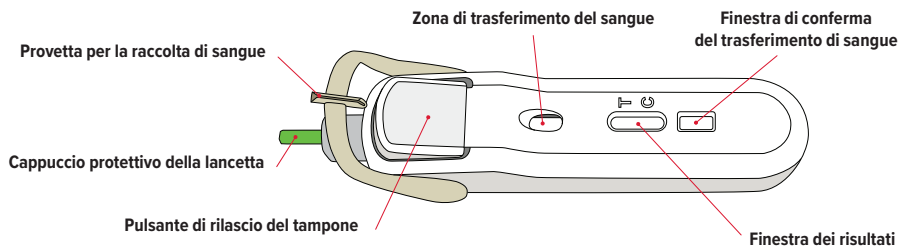

Test Non Utilizzato



Leggere il foglietto illustrativo prima di eseguire il test. Seguire tutti i passaggi nell'ordine indicato.

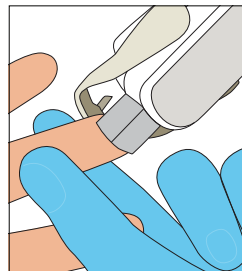

1 Pungere il dito


Utilizzare le precauzioni standard per la raccolta e la manipolazione di un campione di sangue da dito.

Pulire il polpastrello con un tampone imbevuto di alcool e lasciarlo asciugare all'aria. Individuare la lancetta.

Girare e tirare per rimuovere la linguetta di protezione della lancetta.

Premere fermamente la lancetta contro il dito per praticare una puntura sulla pelle. La lancetta si ritirerà.

Asciugare la prima goccia di sangue con una garza.

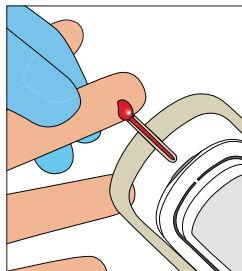


2 Prelevare il sangue

Massaggiare delicatamente il dito per favorire il flusso di sangue e fare in modo che una goccia di sangue fuoriesca dal dito.

Posizionare la provetta di raccolta del sangue sotto il dito ad un angolo di 45 gradi, mettendola in contatto con la goccia di sangue che fuoriesce. Evitare il contatto diretto con il dito del paziente.

ACCERTARSI CHE LA PROVETTA DI RACCOLTA DEL SANGUE SIA COMPLETAMENTE PIENA.

Se la provetta di raccolta del sangue non è piena, stringere delicatamente il dito e aggiungere altro sangue.

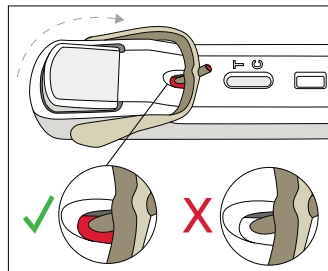

3 Erogare il sangue


Una volta che la provetta di raccolta del sangue è completamente piena, ruotarla sulla zona di trasferimento del sangue.

ASSICURARSI CHE IL SANGUE VENGA TRASFERITO SULLA STRISCIA REATTIVA.

Attendere ~5-10 secondi prima di procedere al passaggio 4.

Se il sangue non si trasferisce immediatamente sulla striscia reattiva, invertire la rotazione della provetta di raccolta del sangue riportandola nella posizione originale. Vi sarà una certa resistenza.

Aggiungere altro sangue nella provetta di raccolta del sangue fino a riempirla. Ruotare nuovamente la provetta di raccolta del sangue sulla striscia reattiva.

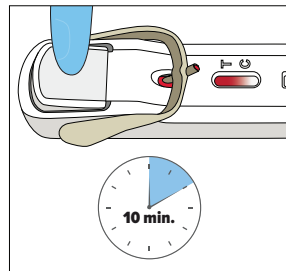


4 Erogare il tampone

Il sangue deve essere visibile sulla striscia reattiva prima di rilasciare il reagente. Attivare il test premendo fermamente e completamente il pulsante di rilascio del reagente per rilasciare quest'ultimo.

Se il sangue non si muove attraverso la finestra di controllo, premere nuovamente il pulsante di rilascio del reagente.

Collocare il test su una superficie piana. Leggere i risultati dopo 10 minuti.

Se il sangue non è ancora scomparso dopo 10 minuti, attendere che il fondo si schiarisca prima di leggere i risultati del test. Non leggere i risultati del test dopo 1 ora.

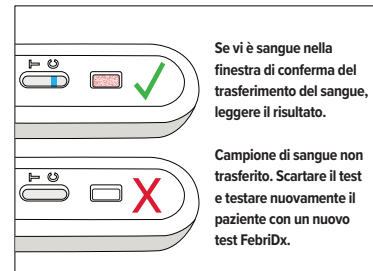

5 Controllare il trasferimento del sangue


Confermare che la **finestra di conferma del trasferimento di sangue** passa da bianca a **rosa/rossa** per indicare il corretto trasferimento del campione di sangue.

Se la finestra di **finestra di conferma del trasferimento di sangue** non diventa **rosa/rossa** significa che il campione non è stato trasferito correttamente e il test deve essere ripetuto.

Come leggere i risultati di FebriDx®

Leggere i risultati dopo 10 minuti. Se il sangue non è ancora scomparso dopo 10 minuti, attendere che il fondo si schiarisca prima di leggere i risultati del test. Non leggere i risultati del test dopo 1 ora.


Perché il test sia valido, nella finestra dei risultati deve apparire una linea di controllo blu.

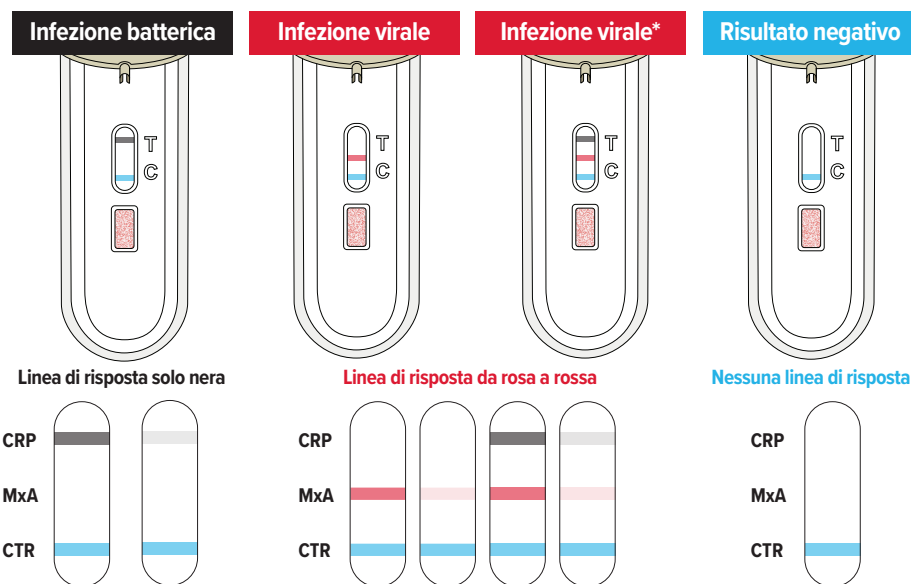

Note importanti

Anche se la linea di risposta è sbiadita, non copre l'intera larghezza della finestra di controllo o è di colore non uniforme, deve essere interpretata come positiva.

Se non è presente una linea di controllo blu, il test non è valido.

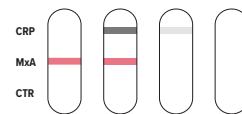

* Non si può escludere la coinfezione. L'incidenza della coinfezione è bassa e può variare in base alla gravità della malattia e alla situazione specifica.